

LeEject 2® 牙科注射器和针头系统

简介

LeEject 2 注射器和针头系统是一种设计用于淘汰现有技术中重新上帽和旋松步骤的牙科装置。这项新技术需要一个学习过程，因此，请访问网站www.LeEject.com并观看教学视频。

适应症

LeEject注射器和针头仅供局部麻醉药筒使用，用于在牙科手术之前或与牙科手术联合施用的浸润和神经阻滞麻醉。

警告

1. 避免施加过大的物理压力或弯曲针头，否则可能导致针头断裂。
2. 切勿用手拾起掉落的针头；请使用牙钳或止血钳将其拾起。
3. 避免将未上帽的针头交给其他牙科医务人员，以防止针头刺伤的风险。

注意事项

1. LeEject 2 注射器只能与LeEject针头一起使用。
2. 建议使用大开口的医疗利器盒，如Covidien的Sharps-A-Gator(型号为31144010)或BD的Wallmate，以便轻松丢弃针头。要求在每个治疗区域摆放一个医疗利器盒。
3. **可以使用一个针头在同一患者身上进行多次注射，但注射完成后，应立即丢弃使用过的针头。如果以后需要另外注射，请使用新针头。**
4. 如果密封破损，则针头不再是无菌的，因此不得继续使用。
5. 如果塑料保护装置损坏，必须予以更换。

清洁/灭菌说明

1. 注射器是未灭菌的，使用前必须灭菌。
2. 每次手术结束后应在超声波清洁剂中彻底清洁注射器，以便清除所有血迹、唾液和麻醉溶液。
3. 清洁后，根据批准的国家/国际标准，在高压灭菌器中对注射器进行灭菌。按照高压灭菌器指导正确灭菌。
4. 将注射器存放在干燥无菌的区域。

操作说明

请观看我们网站上的教学视频，网址为www.LeEject.com。

插入LeEject针头

1. 保护装置是旨在保护针头的唯一塑料部件。旋转保护装置以对齐锥形插孔区域。
2. 拧开短保护帽并露出锥体，然后将针头的锥体部分放入注射器中。
3. 顺时针旋转保护装置以固定针头。
4. 注射前才取下长帽。

插入麻醉药筒

拉动柱塞，将麻醉药筒放入注射器筒中。

手动抽吸

轻敲拇指环，以使针尖插入药筒的橡胶塞内。始终在注入前抽吸并缓慢注入。

取下药筒

通过快速拉动拇指环将针尖从药筒中取出。将药筒从下面的小窗口中推出。用对面的拇指和食指抬起药筒。如果需使用另一只药筒，请将其放入注射器中。

处置针头



1. 拔出针头前，先取下药筒。
2. 逆时针旋转安全装置，露出针头的锥体部分，然后倒置注射器，以使针头直接落入下面放置的医疗利器盒的开口中。
3. 或者，将针头放置在牙托上。使用牙钳或止血钳立即拾起针头并将其放入医疗利器盒中。保持您的工作区域安全清洁。

用户帮助信息：


可通过发送电子邮件至info@LeEject.com或致电+1 201 803 5202

联系Advanced Technology & Capital, Inc. 5 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632。


LeEject 2® Syringe Instructions

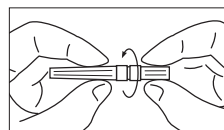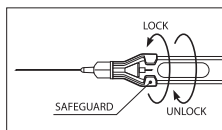


1. Twist off the protective cap.

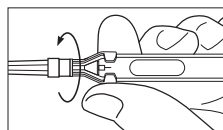

2. Place the needle into the syringe and rotate the plastic Safeguard counter clockwise.

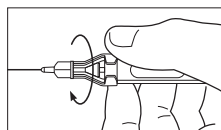

3. After use, remove cartridge and turn over Safeguard clockwise.

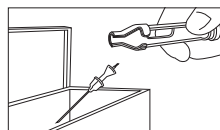

4. Position syringe and invert it so that needle falls into sharps container.



LeEject 2® Syringe & Needle
Dental Safety Device